

Dezinfecția cu raze UV-C de nivel log-5 în 25 de secunde a instrumentelor și dispozitivelor medicale, pentru protecția persoanelor vulnerabile.

 **Dezinfecție validată**

Proces controlat cu senzori optici pentru un rezultat consistent și verificat.

 **Ciclu rapid**

Tehnologia Impelux™ asigură o dezinfecție consistentă și repetabilă în 25 de secunde.

 **Ușor de utilizat**

Dezinfectează în 25 de secunde, ușor de utilizat, portabil și ușor de integrat în circuitele operaționale.

 **Siguranță**

Tehnologia Impelux™ nu distruge materialele și nu emite radiații în exterior.

 **Prietenos cu mediul**

Nu utilizează apă, substanțe chimice solide sau lichide. În plus, lămpile pot fi reciclate.



# TESTAT DE



umcg



Amsterdam UMC  
Universitair Medische Centra



Radboudumc

Vezi rezultatele testelor pe [www.uvsmart.nl](http://www.uvsmart.nl)

## UTILIZARE

Înainte de procesul de  
dezinfecție



### PASUL 1

Îndepărtați depunerile vizibile  
de pe obiectele medicale

Începerea procesului



### PASUL 2

Introduceți obiectele în  
interiorul D25 și închideți  
capacul manual.


În timpul procesului de  
25 de secunde



### PASUL 3

Dezinfectați-vă pe mâini  
conform protocolului.

Dezinfecție reușită

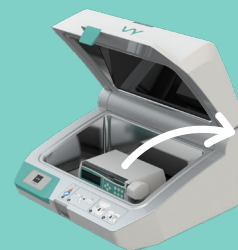

### PASUL 4

Capacul se deschide  
automat\*. Scoateți obiectele.

\*Lumină verde = Dezinfecție reușită.  
\*Lumină roșie = Dezinfecție eșuată,  
vă rugăm să repetați  
ciclul de dezinfecție.

## SPECIFICAȚII

<b>Dimensiuni exterioare (lxwxh)</b>	470x445x275 mm	<b>Reducere</b>	Log-5 (99,999%)
<b>Dimensiunile camerei (lxwxh)</b>	420x265x160 mm	<b>Standarde</b>	NEN-EN 14885, NEN-EN 60601-1
<b>Durata dezinfecției</b>	25 seconds	<b>Dovedit clinic de</b>	Radboud UMC, Streeklab Haarlem & UMC Groningen
<b>Utilizat împotriva</b>	Toți agenții patogeni (Bacterii, Spori, Fungi, Candida, Micobacterii, Tuberculoză, Viruși)	<b>Tip de dispozitiv medical</b>	Clasa Ila



UV Smart B.V.  
Olof Palmestraat 16  
2616 LR Delft, NL

[www.uvsmart.nl](http://www.uvsmart.nl)  
info@uvsmart.nl  
+31 850 609 800



SRM Medical SRL  
Str. Pretorienilor, nr. 6, sector 5  
București, 050566

[www.srmmedical.ro](http://www.srmmedical.ro)  
office@srmmedical.ro  
+40 (0) 732 011 607